


CT検査を、より快適に、より簡単に。

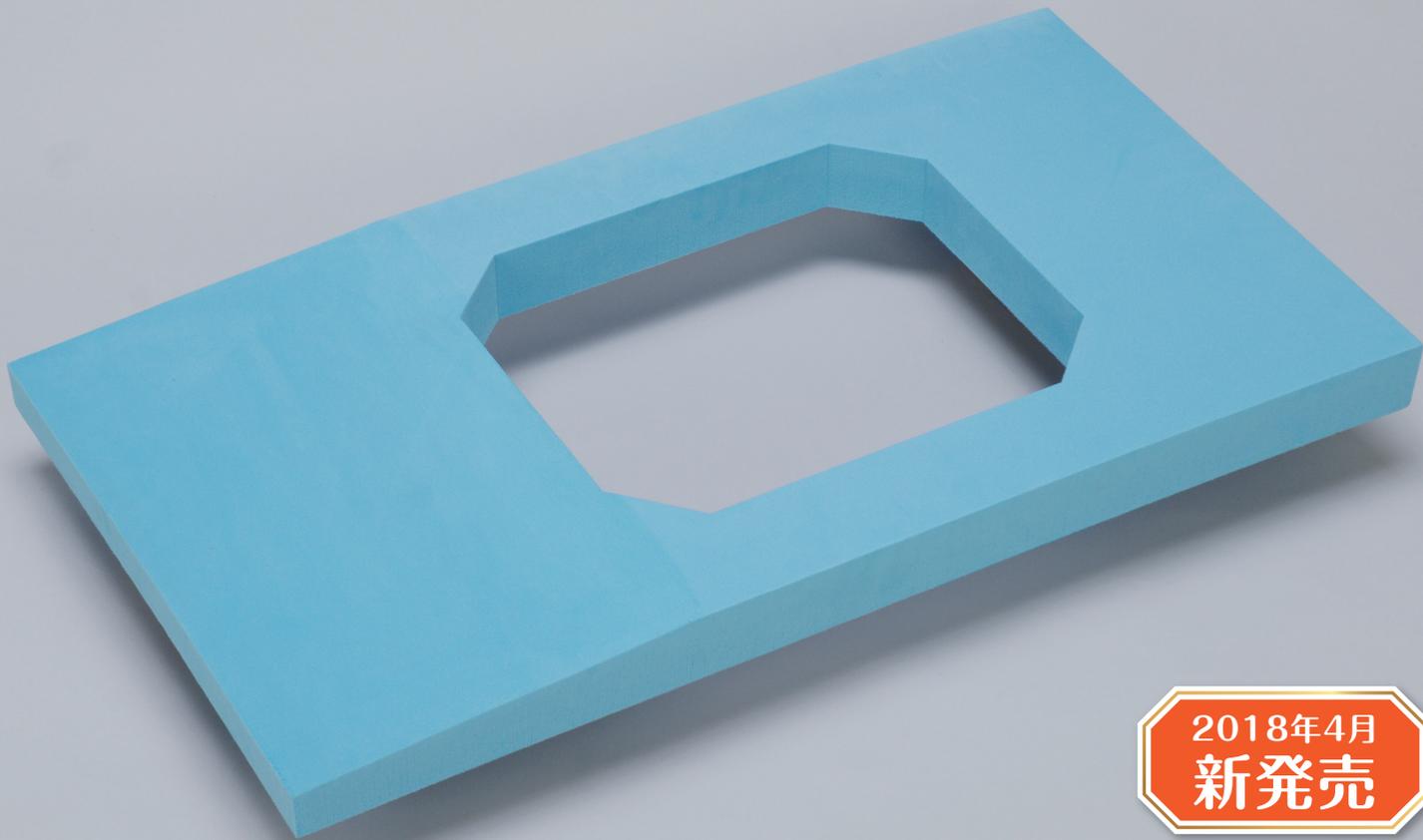

2018年4月
新発売

コロンマット

CT検査補助具

マットの上で「コロン」と回転するだけで体位変換が可能。撮影時の体位維持や、体位変換の負担を軽減します。

- ◎検査台に置くだけで使用可能。貼付け等の作業は不要です。
- ◎マットの空洞部が体位変換をサポートし、受診者の負担を軽減します。
- ◎体位変換の際に、マットの着脱は不要です。
- ◎MRI、エックス線検査等にも使用できます。
- ◎ポリエチレン発泡体で、汚れが染み込みにくく水洗いが可能です。
- ◎次亜塩素酸ナトリウムやエチルアルコール等を用いて消毒することが可能です。

FSK 伏見製薬株式会社

〒763-8605 香川県丸亀市中津町1676番地

仙台営業所 TEL 022-295-5667
大阪営業所 TEL 06-6160-2431

東京営業所 TEL 03-5328-7801
中四国営業所 TEL 0877-22-7284


名古屋営業所 TEL 052-732-8555
福岡営業所 TEL 092-413-4107

外 観



正面画像

中央に八角形の空洞があります。

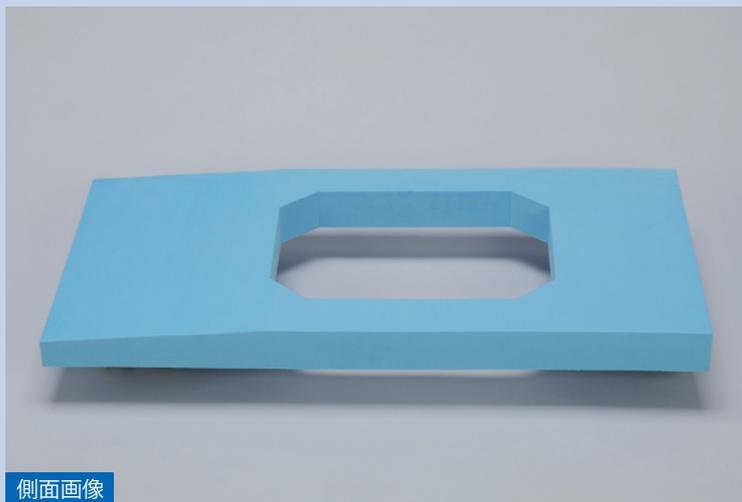


側面画像

腹部側に傾斜があります。

使い方・特徴

- ◎ マットの空洞部に腹部、肩、背部を入れるようにして臥位になります。
- ◎ 腹部とCT台の間に空間をつくり、送気時に腹部の拡張を良好にします。
- ◎ 複数の体位で撮影を行う場合、マットの空洞部を利用することで、肩等に負担を与えることなく体位変換が可能です。体位変換の際にマットの着脱は不要です。

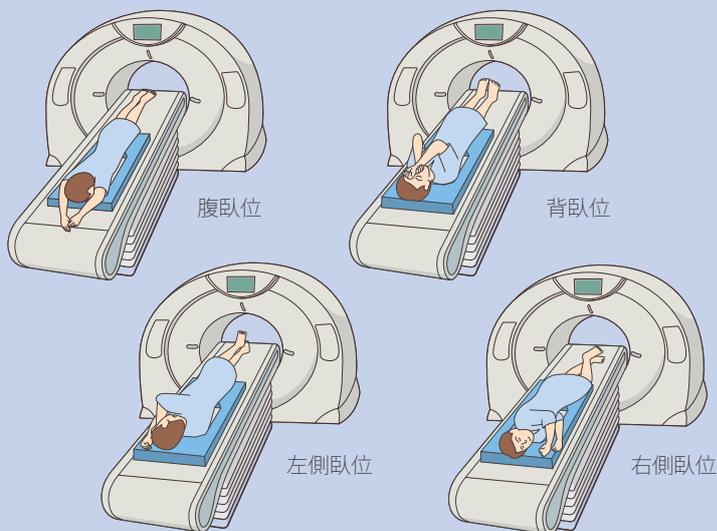

コロンマットは会津医療センターとの共同開発によりできました!

大腸CT検査において、腸管の良好な拡張は重要です。会津医療センターでは、コロンマットの使用により良好な腸管拡張の画像が得られています。

会津医療センター
放射線科
歌野健一 医師



[使用上の注意]

- ◎ 警 告: 火気の近くでは使用しないで下さい。
- ◎ 注 意: 直射日光を避けて保管して下さい。
ナイフや鋭利なもので、表面を傷つけないで下さい。
- ◎ お 願 い: 吸水シート等を使用し、製品が汚れないようにしてご使用下さい。

[製品仕様]

製造国	日本	規 格	全長900mm×全幅500mm×厚さ60mm
材 料	ポリエチレン発泡体	色	青
使用温度範囲 ^{※1}	-20℃～70℃	吸水率 ^{※1}	0.002 g/cm ³
耐薬品性 ^{※2}	次亜塩素酸ナトリウム (0.1%)、エチルアルコール、水酸化ナトリウム、塩酸、硫酸、アセトン、中性洗剤溶液 等		

※1: JIS K-6767¹⁹⁹⁹に準拠。 ※2: 溶剤中24時間浸漬、48時間乾燥後に寸法変化が2%未満。